



CAISA®
Calidad de **Alto Grado°**

FI CHA TECNICA
EsterClave
CAISA

Datos Generales

Artículo		Mini autoclave para esterilizar pequeños instrumentos a base de vapor.
Uso		Verificación del Proceso de Esterilización
Dimensiones		6x2 cms.
Volumen		Kit con 10 y 20 unidades
Presentación		Caja con 50 unidades

Características

1. Frasco transparente de vidrio refractario
2. Resiste temperaturas en calor seco a 120° C por 25 minutos y en autoclave 121°C por 20 min.
3. Util en el proceso de esterilización, almacenamiento y organización de su instrumental.

Instrucciones de Uso

1. Colocar en el ESTERCLAVE el instrumental previamente lavado con agua y jabón.
2. Llenar hasta el nivel indicado con agua purificada o destilada.
3. Cerrar fuertemente dejando así en el interior agua y aire.
4. Introducir los ESTERCLAVE al horno CAISA
5. PRECALENTAMIENTO INTEGRADO.- Seleccionar 125°C en termostato y 25 minutos en el timer.Su aparato precalentará automáticamente.
6. CONVENCIONAL: Precalentar a 125° C en termostato y 40 minutos en timer; ya que el indicador superior se apague (sin abrir la puerta del horno) gire nuevamente el control de tiempo a 25 minutos para terminar el proceso de esterilización.
7. En este tiempo aumenta la presión a 1.4.

Distribuidora Caisa S.A. de C.V.



56 3080 9434

tel..... (+52)55 3300 4400
mail....ventas@grupocaisa.mx

Camino de los Toros #57. Alvaro Obregón. Ciudad de México. C.P. 11820. México



CAISA®
Calidad de **Alto Grado®**

ESTERCLAVE Sistema de Esterilización
Para instrumental pequeño un concepto grande



Distribuidora Caisa S.A. de C.V.



56 3080 9434

tel..... (+52)55 3300 4400
mail....ventas@grupocaisa.mx

Camino de los Toros #57. Alvaro Obregón. Ciudad de México. C.P. 11820. México